


Інструкція з застосування медичного виробу «Пов'язка антисептична одноразова стерильна «Гідробинт №1»

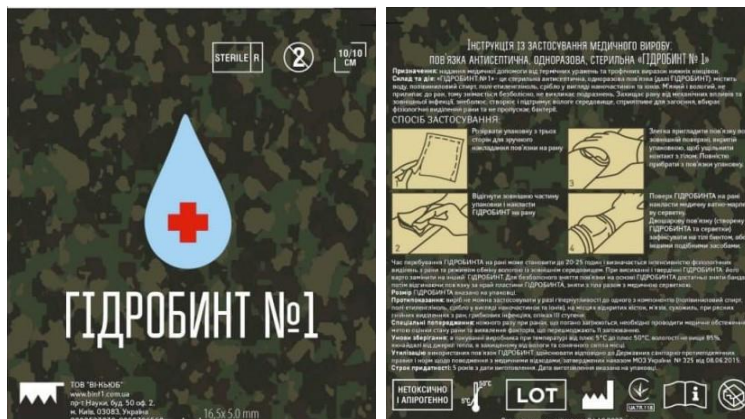

Призначення: захист і лікування опіків I-IIA ступеня, помірно інфікованих ран, трофічних виразок, пролежнів I-II-III ступеня, гранулюючих ран.

Склад та дія: вода, полівиниловий спирт, полі-етиленгліколь, срібло у вигляді наночастинок та іонів.

М'який і вологий, не прилипає до рани тому знімається безболісно, не викликає подразнень чи алергії. Захищає рану від механічних впливів та зовнішньої інфекції; дезінфікує, охолоджує і знеболює; створює і підтримує вологе середовище, сприятливе для загоєння; вбирає фізіологічні виділення рани, пропускає кисень і лікувальні розчини, але не пропускає бактерії.

Спосіб застосування:

1. Розірвати упаковку з трьох сторін для зручного накладання пов'язки на рану
2. Відігнути зовнішню частину упаковки і накласти "ГІДРОБИНТ №1" на рану

3. Злегка пригладити пов'язку по зовнішній поверхні, вкритій упаковкою, щоб ущільнити контакт з тілом. Повністю прибрати з пов'язки упаковку
4. Поверх "ГІДРОБИНТа №1" на рані накласти медичну ватно-марлеву серветку. Двошарову пов'язку (створену з "ГІДРОБИНТа №1" та серветки) зафіксувати на тілі бинтом або іншими подібними засобами.

Час перебування "ГІДРОБИНТу №1" на рані може становити до 20-25 годин і визначається інтенсивністю фізіологічних виділень з рани та режимом обміну вологою із зовнішнім середовищем.

При висиханні і твердінні "ГІДРОБИНТу №1" його варто замінити на інший. "ГІДРОБИНТ №1" не прилипає до ран. Тому для безболісного зняття пов'язки на основі "ГІДРОБИНТу №1" достатньо зняти биндаж, потім відгинаючи пов'язку за край пластини, зняти з тіла разом з серветкою.

Протипоказання: виріб не можна застосовувати у разі гіперчутливості до одного з компонентів, на місцях відкритих кісток, м'язів, сухожилів, при рясних гнійних виділеннях з ран, грибкових інфекціях, опіках III ступеню.

Спеціальні попередження: кожного разу при ранах, що погано загоюються, необхідно проводити медичне обстеження з метою оцінки стану рани та виявлення факторів, що перешкоджають її загоюванню.

Умови зберігання: в пакуванні виробника при температурі від +5°C до +50°C при вологості не вище 85% якнайдалі від джерел тепла в захищеному від вологи та сонячного світла місці.

Утилізацію використаних пов'язок ГІДРОБИНТ№1 здійснювати згідно Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджених наказом МОЗ України №325 від 08.06.2015.

Строк придатності: 5 років з дати виготовлення, яка вказана на упаковці продукту.